



Klarspüler für die maschinelle Aufbereitung von  
Medizinprodukten

## thermodent® clear

### Unser Plus

- optimale Benetzung des Spülgutes
- sorgt für fleckenfreie Trocknung
- materialschonend

### Anwendungsgebiete

Klarspüler (Konzentrat) für die maschinelle Aufbereitung von zahnärztlichem Instrumentarium zur Unterstützung einer fleckenfreien Abtrocknung im letzten Spülgang. Der Klarspüler ist ph-neutral und besonders gut materialverträglich. Unterstützt die Trocknungsphase innerhalb des Reinigungs- und Desinfektionsgerätes. Für die Verwendung in allen gängigen Reinigungs- und Desinfektionsgeräten geeignet.

### Anwendungshinweise

Einsatzkonzentration: 0,01 - 0,03 % (d.h. 0,1 - 0,3 ml/l Wasser)  
Für den Einsatz als Klarspülkomponente im letzten Spülschritt in allen gängigen Reinigungs- und Desinfektionsgeräten geeignet. Die Dosierung erfolgt über die in der Türklappe vorgesehene Dosiervorrichtung/-fenster oder über die maschineneigenen Sauglanzen. Bitte beachten Sie die Empfehlungen der Instrumenten- und Gerätehersteller.



## Produktdaten

Zusammensetzung: 15 - 30 % nichtionische Tenside, Lösungsvermittler, Korrosionsinhibitor, pH-Regulator.

### Chemisch-physikalische Daten

Dichte	ca. 0,99 g/cm <sup>3</sup> / 20 °C
Farbe	farblos
Flammpunkt	37 °C / Methode : DIN 51755 Part 1
Form	flüssig
pH	7 / 100 % / 20 °C
Viskosität, dynamisch	Keine Daten verfügbar

## Bestellinformation

Artikel	Lieferform	Art.-Nr.
thermodent clear 1 l FL	10/Karton	143101

## Verwandte Produkte

- thermodent<sup>®</sup> alka clean
- thermodent<sup>®</sup> neutralizer

## Umweltinformation

schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.

## Gutachten und Information

Einen Überblick zum Produkt finden Sie im Internet unter [www.schuelke.com](http://www.schuelke.com). Für individuelle Fragen: Customer Sales Service Telefon: +49 40 52100-666 E-Mail: [info@schuelke.com](mailto:info@schuelke.com)



Die Schülke & Mayr GmbH ist im Besitz einer Herstellungserlaubnis nach §13 AMG Abs.1 und von GMP-Zertifikaten für Arzneimittel.

schülke Hauptsitz  
Schülke & Mayr GmbH  
Robert-Koch-Str. 2  
22851 Norderstedt  
Deutschland  
Tel. +49 40 - 52100 - 0  
Fax +49 40 - 52100 - 318  
[www.schuelke.com](http://www.schuelke.com)  
[info@schuelke.com](mailto:info@schuelke.com)